

Medicarine®



Desinfectietabletten voor oppervlakte desinfectie

9451 N

Toepassing

Medicarine is een desinfectietablet op basis van actief chloor, bestemd voor de desinfectie van oppervlakken zoals vloeren, wanden, meubilair, sanitair en gebruiksmaterialen.

Productinformatie

- Medicarine is wettelijk toegelaten als desinfectiemiddel onder nummer 9451N.
- De werkzame stof van Medicarine chloortabletten is natriumdichloorisocyanuraat, een van de meest stabiele chloorverbindingen.
- Medicarine wordt geleverd in tabletvorm. Dit heeft als voordeel dat het mogelijk is om eenvoudig en correct te doseren, zonder verspilling. Bovendien stuift het product niet, waardoor er minder kans is op irritatie van ogen en luchtwegen.
- Medicarine heeft een zeer breed werkingsspectrum, zoals algemeen bekend is van chloor.
- Medicarine chloortabletten lossen snel en volledig op.
- In de voorgeschreven gebruikskonzentraties worden de meeste kunststoffen en metalen oppervlakken niet aange-tast. Bij aluminium de minimale contacttijd aanhouden.
- Medicarine chloortabletten zijn verpakt in een veilige, goed afsluitbare pot.

Houdbaarheid

Medicarine chloortabletten zijn in een gesloten pot onbeperkt houdbaar. Oplossingen zijn zeer stabiel.

Fysische en chemische gegevens

Werkzame stof: natriumdichloorisocyanuraat
Gehalte: 99% (1,5 gram actief chloor per tablet) 150 ppm
Gewicht: 2,7 gram per tablet
pH-waarde: ca. 7,4 (1 tablet/10 liter water)
Uiterlijk: witte ronde tablet

Opslag

Tabletten bewaren in gesloten pot, bij voorkeur op een donkere, droge en koele plaats.

Gebruiksaanwijzing

Medicarine chloortabletten zijn geschikt als desinfectie-middel voor de behandeling van oppervlakken zoals vloeren, wanden, meubels, sanitair, gebruiksmaterialen e.d. De te desinfecteren oppervlakken vooraf goed reinigen. Los minimaal 1 tablet Medicarine op in 10 liter water. Goed roeren. Minimale inwerkingstijd bedraagt 5 minuten. Na desinfectie, naspoelen met leidingwater. Dit geldt in het bijzonder voor oppervlakken die met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen.

Voor gebruik in het ziekenhuis en overige instellingen voor gezondheidszorg worden Medicarine chloortabletten aanbevolen voor:

Toepassingsgebied

	Gebruiks-verdunning	Minimale inwerkingstijd
Oppervlakken (vloeren, wanden, meubilair) met uitzondering van tbc-afdelingen.	1 tablet op 10 ltr water	5 min
Oppervlakken en apparatuur in keukens.	1 tablet op 10 ltr water	5 min
Toiletten en overig sanitair.	1 tablet op 10 ltr water	5 min
Instrumentarium, uitsluitend na gebruik en voor reiniging na sterilisatie, met uitzondering van cystoscopen en ander delicaat instrumentarium.	1 tablet op 10 ltr water	5 min

Veiligheidsaanbevelingen

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.

Bijzondere gevaren

Schadelijk bij opname door de mond. Vormt giftige gassen in contact met zuren. Irriterend voor de ogen en ademhalingswegen.

Verpakking

Doos à 6 x 300 tabletten.

Ecolab is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of onjuiste toepassing van dit product